

## Charging e-motion-batteries

### Quand est-ce que la batterie est pleinement chargée?

Ne pas débrancher le chargeur avant que la charge soit complète. Cet état est indiqué lorsque la diode verte du chargeur s'allume.

### Evitez les décharges totales!

L'électronique intelligente de l'Emotion a un système de surveillance des batteries qui protège des décharges totales et de tout dommage pouvant être causé au pack batterie lors du roulage. Mais si des batteries vides sont maintenues en stock pendant une longue période elle peuvent être endommagée par leur décharge naturelle.

- Connecter les batteries vides au chargeur et les charger entièrement
- Les batteries devraient être connecté au chargeur pendant toute la période d'inutilisation.



**Autonomie maximum:** Pour bénéficier de la capacité maximum de vos batterie emotion vous devez utiliser le système jusqu'à ce que le batterie soit vide et que la diode rouge d'état des batteries s'allume seule. Cela doit être fait tous les 10 cycles de charge/décharge.

### Durée de vie:

les batteries emotion ont 500 cycles de charge. Passer cette durée de vie seul des courts trajets peuvent être opérés. **Attention!** Un "vieux" pack batterie indique une charge „pleine!“ après la charge en indiquant 5 diodes allumées, mais la capacité réelle (et donc l'autonomie) est moins importante qu'un pack batterie neuf

