




# Affichage du REM 24sd



## AFFICHAGE DU REM 24 SD



Commande tierce personne

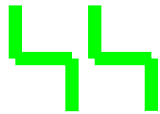

Vérins électriques




klaxon



Ecu 1



Ecu 2

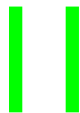

lumière



## DEFAUT DU REM 24 SD

E

Défaut clam (ou relais Storm03)

JJ

Défaut joystick (maître ou externe)

4

Réinitialisation en mode toute fonction


-5

Conduite inhibée (voir flash code)

00

Défaut du manipulateur

# Toute fonction au joystick , conduite et choix de menu

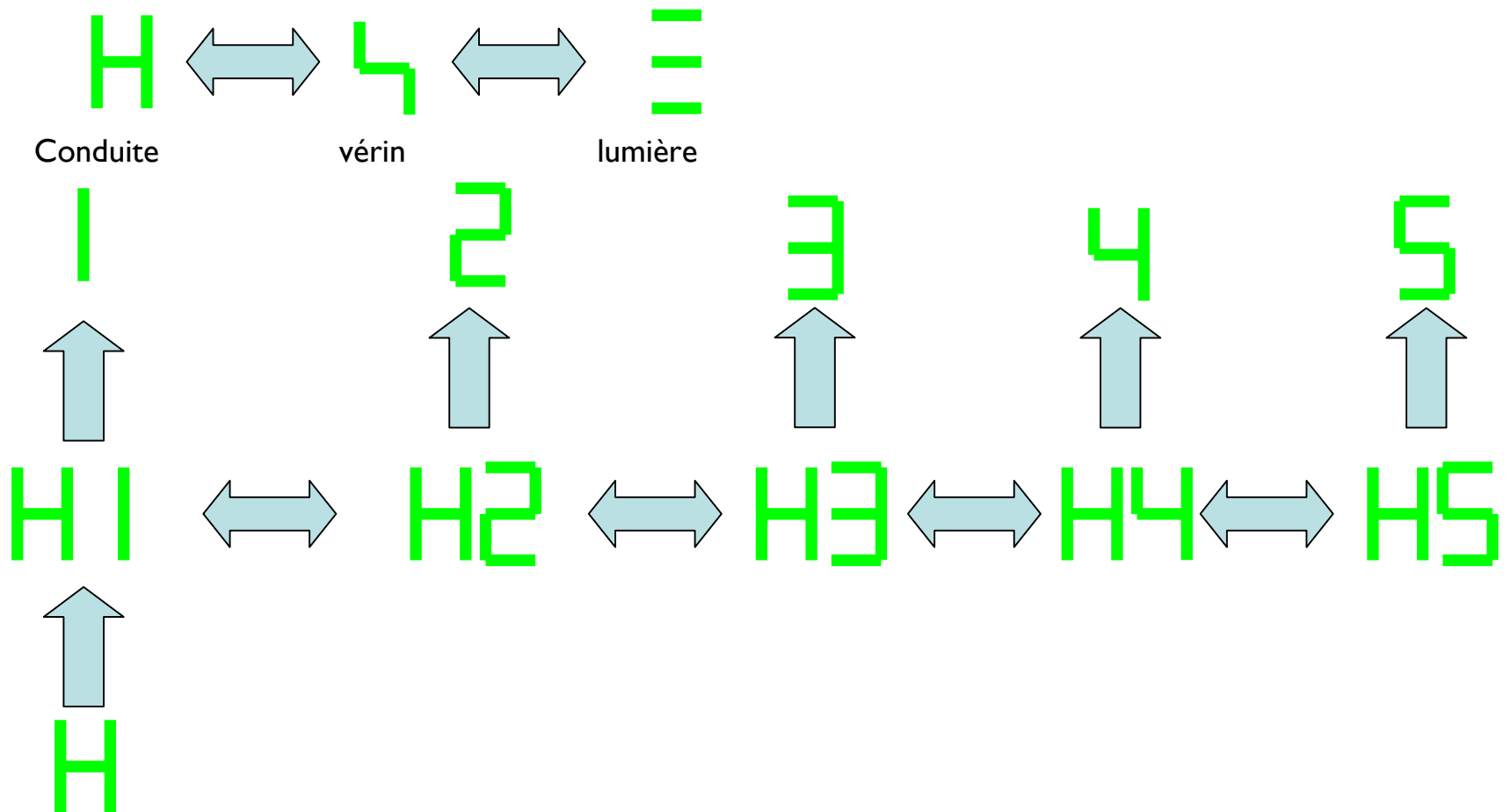

# EQUIPEMENT ROUTE AU JOYSTICK



Warning




Clignottant gauche



Clignottant droit




Feux de positions

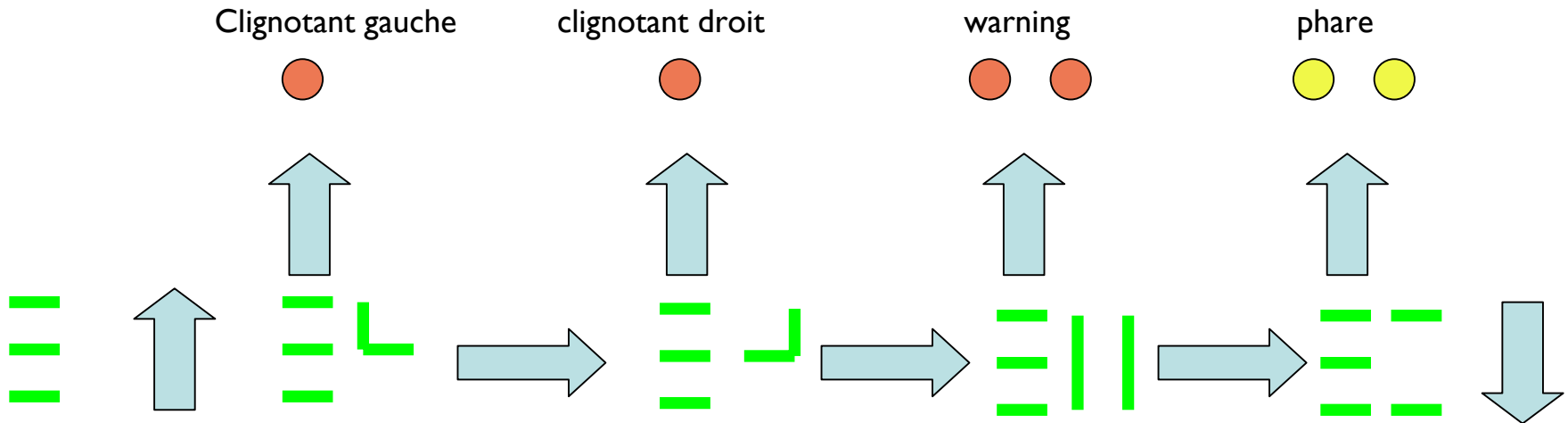


Inclinaison d'assise

m  
o  
n  
t  
é  
e  
  
d  
e  
s  
c  
e  
n  
t  
e

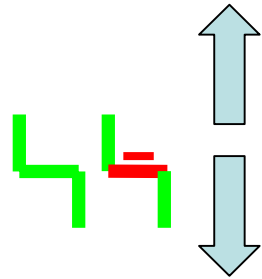





Inclinaison de dossier

m  
o  
n  
t  
é  
e  
  
d  
e  
s  
c  
e  
n  
t  
e

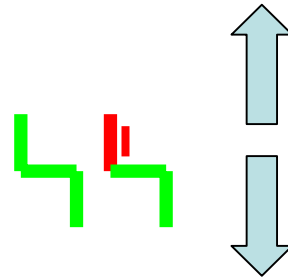



Repose jambe gauche

m  
o  
n  
t  
é  
e  
  
d  
e  
s  
c  
e  
n  
t  
e

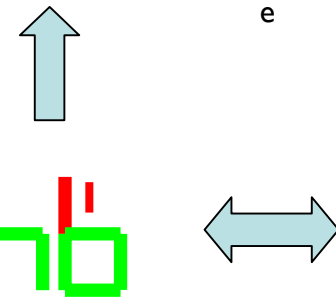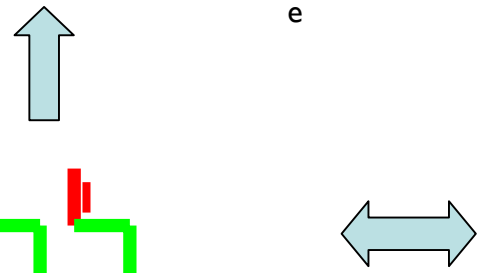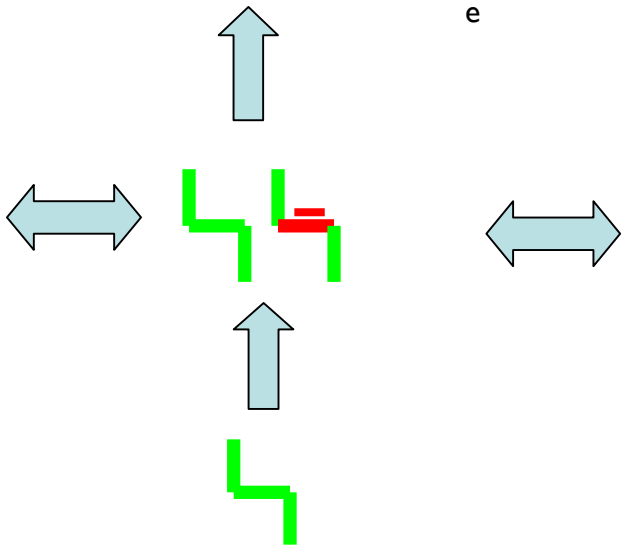
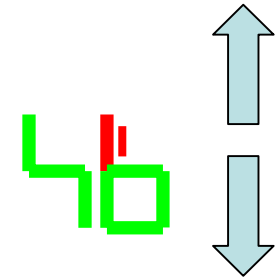


# Vérins au joystick


Les 2 repose jambes

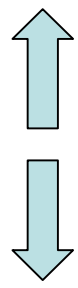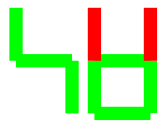


m  
o  
n  
t  
é  
e  
  
d  
e  
s  
c  
e  
n  
t  
e

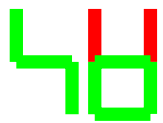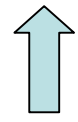


Repose jambe droit

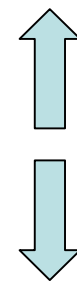



m  
o  
n  
t  
é  
e  
  
d  
e  
s  
c  
e  
n  
t  
e

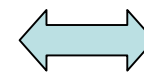

Lift , élévation d'assise

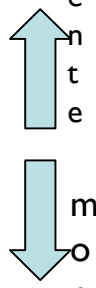


d  
e  
s  
c  
e  
n  
t  
e  
  
m  
o  
n  
t  
é  
e

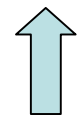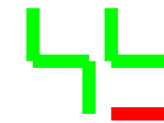


# Vérins au joystick

# Vérin sur commande occipitale


Les 2 repose jambes

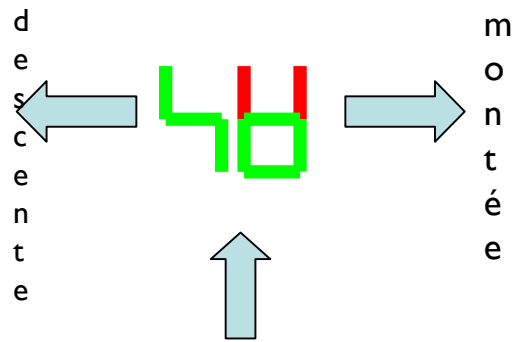

Repose jambe droit

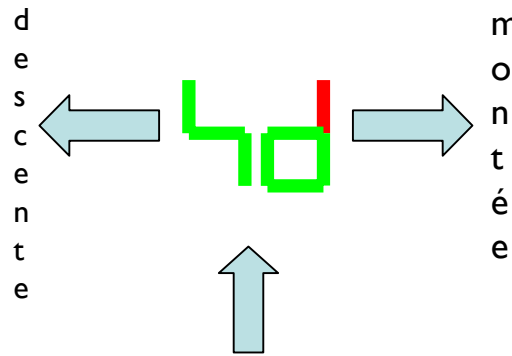


Lift , élévation d'assise

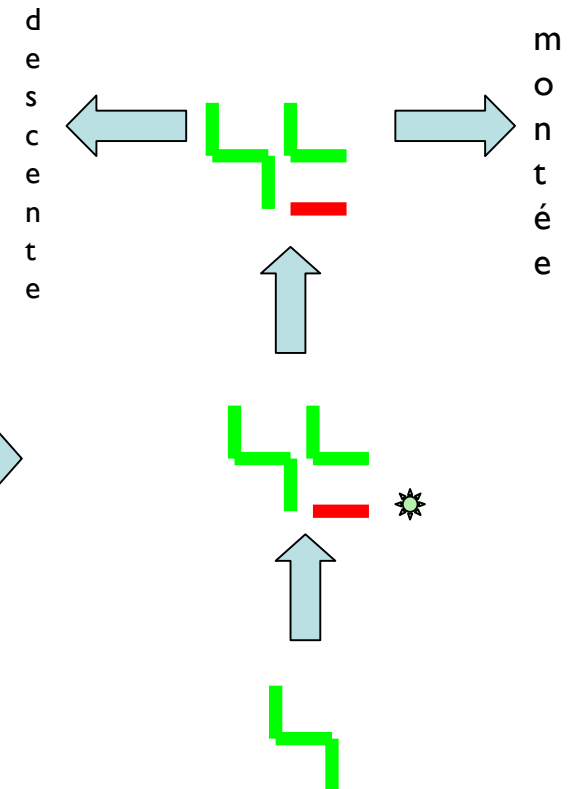




# Vérin sur commande occipitale

Inclinaison d'assise

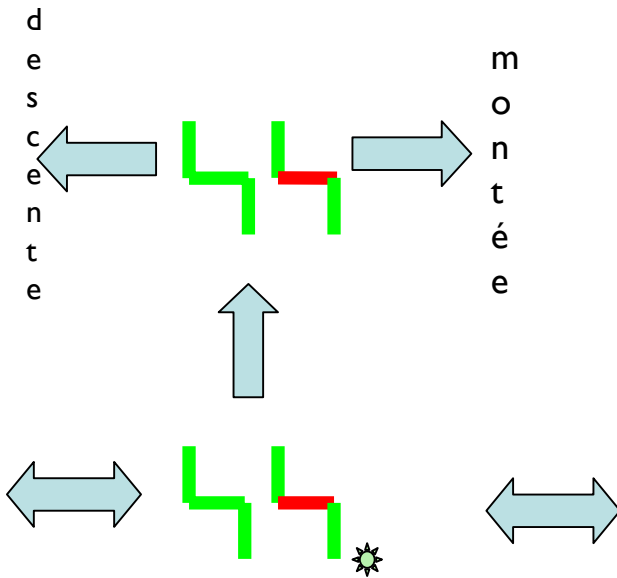

Inclinaison de dossier

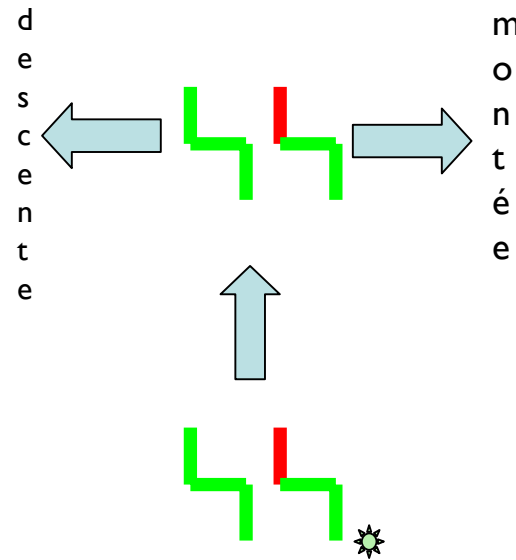

Repose jambe gauche

