
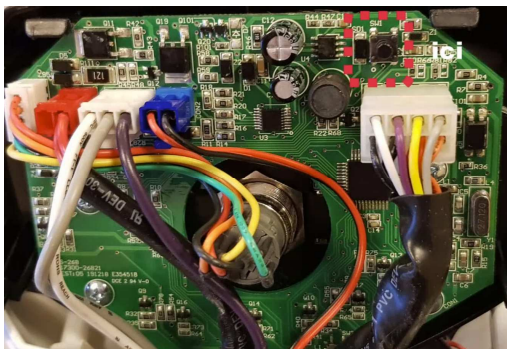


Appairage de la télécommande du scooter Scorpius

1ère étape : appairer le déverrouillage

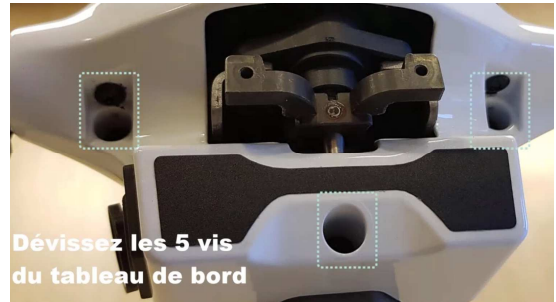

2nd étape : appairer le pliage/dépliage

Allumez et déverrouillez le scooter



Appuyez deux secondes simultanément sur les touches de pliage/dépliage



Les deux voyants doivent être fixes

PLIER **DÉPLIER**



Présentez la clé et appuyez brièvement sur l'une des deux fonctions



L'appairage du pliage/dépliage est effectué



Éteignez le scooter...



...et testez l'appairage

